

ノンクラスプ義歯をお使いの患者様へ

Maintenance Non Clasp Denture

保険義歯に比べ柔らかく、傷がつきやすい樹脂で出来ています。下記の注意点を読んでいただき、日頃のメンテナンスをお願いいたします。



やってはいけない事

- 硬いブラシを使用する
- アルカリ性(塩素系)の洗浄剤を使用する
- 歯磨き粉などの研磨材でのブラッシング
- 無理な力を加える
- 煮沸・熱湯消毒



日頃のメンテナンス

- 柔らかいブラシやスポンジを使用して汚れを落とす(カレー、コーヒー、紅茶など着色しやすいものを飲食した際は早めに水洗いをする)
- 酸性、中性の洗浄剤を使用し、所定の時間浸け置く
- 就寝時は洗浄剤の中に入れてままでOKです
- よく水洗いをして口腔内に装着してください。

着脱の方法



アームの掛かっている歯の上に親指を置き、歯茎の方からアームの付け根に爪を引っ掛けて義歯を外します。



それ以外の場所を持ち上げてしまうと無理な力が加わり健全な歯を痛めてしまいます。義歯の破折にもつながってしまいます。お口の中の状態(歯の傾き)によっては、アームを外す順番に違いがあります。慣れるまでは均等に義歯を持ち上げる感覚でお試しく下さい。

洗浄材のご紹介



バルプラス対応



スマイル・ブライト(弱酸性)
240ccの水に同封のスプーン一杯を溶かし15分以上浸けてください。
この溶液は4,5日間使用できます。



アクリトーン対応



フィジオクリーン・キラリ(中性)
150ccのぬるま湯に一錠いれ30分以上浸けてください。1晩つけておくと効果的です。溶液は使いきりです。